



NORA Aluminium

Sehr leichte, flexible Aufrichthilfe in Aluminium-Bauweise
mit speziellen Anpassungsmöglichkeiten an kleinere Bewohner

Verbesserung der Mobilität

Für eine höhere Lebensqualität Ihrer Bewohner ...





Die Aktivierung Ihres Bewohners ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Pflege ...

Unsere innovative Aufrichthilfe NORA Aluminium wurde speziell für Bewohner konzipiert, die noch die Fähigkeit besitzen kurzzeitig, unter Zuhilfenahme von Stützhilfen, zu stehen. Hier ist die NORA Aluminium das ideale Hilfsmittel um diese Bewohner, ohne Rückenbelastung des Pflegepersonals, sicher und bequem zu transportieren und z. B. den Transfer zur Toilette zu erleichtern. Die Steigerung der Mobilität und die gezielte Aktivierung von Bewohnern ist heute Bestandteil jedes Pflegeleitbildes.

Die NORA Aluminium bietet die ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Bewohner gezielt wieder zu mobilisieren und den Bewegungsapparat und damit auch den Kreislauf zu stabilisieren und zu verbessern. Dies führt nachweislich zu einer höheren Lebensqualität Ihrer Bewohner. Ein gezieltes, langsames und sicheres Aufrichten des Bewohners bis zur vollen lotrechten Belastung der Beine ist mit unserer NORA Aluminium problemlos möglich.

Aufrichthilfe NORA Aluminium

Sehr leicht und wendig dank Aluminiumbauweise ...



Spezielle Anpassung an kleinere Bewohner ...



Zusätzliche Gurtaufnahmepunkte für Personen bis 1,60 m Körpergröße

Kleinere Bewohner mit einer Körpergröße bis 1,60 m haben bei anderen Aktivliftern das Problem, dass sie nicht aufrecht stehen können. Das Aufrichten mit diesen Liftern kann für kleinere Bewohner unangenehm und schmerzhaft sein. Unsere NORA Aluminium bietet daher am Gurtaufnahmebügel zwei zusätzliche Aufnahmebolzen für die Gurteinhängung, um kleinere Bewohner sicher und bequem, ohne schmerzhaften Druckausübung auf Rücken und Achseln, aufrichten zu können.

Flexible, mehrfach höhenverstellbare Doppelkniepolster

Unsere ergonomisch geformten, flexiblen Doppelkniepolster sind einzeln gelagert und zusätzlich höhenverstellbar für eine optimale Anpassung bei der Übernahme von kleineren Bewohnern. Durch diese individuelle Anpassungsmöglichkeit an die Körpergröße entsteht beim Aufrichten kein schmerzhafter Druck auf die Knie Scheibe Ihres Bewohners.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Das perfekte Hilfsmittel für die Mobilisierung und den Transfer
- ❑ Leichtbauweise mit Aluminiumkomponenten, sehr leicht zu manövrieren
- ❑ Zusätzliche Gurtaufnahmepunkte zum Aufrichten speziell von kleineren Bewohnern bis 1,60 m Körpergröße
- ❑ Flexible, höhenverstellbare Kniepolster mit Sicherheitsgurten, speziell anpassbar an kleinere Bewohner
- ❑ Elektrisch spreizbares Fahrgestell
- ❑ Kann auch zum Duschen des Gesäßbereichs verwendet werden
- ❑ Keine Wirbelsäulenbelastung/-schäden der Pflegekraft beim Transfer
- ❑ Bedienung durch eine einzelne Pflegekraft möglich
- ❑ Hohe Flexibilität durch ein neues Gurt- und Ergonomiekonzept beim Heben
- ❑ Großer Hubbereich mit Notablassfunktion
- ❑ Geschlossene Rollen und ergonomische Handgriffe



Leistungsmerkmale NORA Alu

Die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...





- 1 Die ergonomischen Handgriffe ermöglichen eine optimale Griffposition zum Lenken.



- 2 Haltegriffe mit zwei zusätzlichen Gurtaufnahmepunkten speziell für kleinere Bewohner bis 1,60 m Körpergröße.



- 3 Kabelfernbedienung mit Anzeige des Akkuladestandes.



- 4 Flexible, höhenverstellbare Kniepolster mit Sicherheitsgurten, speziell anpassbar an kleinere Bewohner bis 1,60 m Größe.



- 5 Leicht zu fahrende Steinco Rollen, zwei davon feststellbar für mehr Sicherheit beim Aufrichten.



- 6 Leichte Aluminiumbauweise. Fahrgestell, Hubsäule sowie Anbaukomponenten aus 100% Aluminium.



- 7 Elektrisch spreizbares Fahrgestell.



- 8 Kann auch zum Duschen des Gesäßbereichs verwendet werden.



- 9 Speziell entwickelte, hochwertige Aufrichtgurte in unterschiedlichen Größen lieferbar.

Technische Daten NORA Aluminium

Max. Patientengewicht	200 kg
Gesamtgewicht	50,7 kg
Gesamtlänge	1.027 mm
Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell	700 mm
Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell	897 mm
Höhe des Fahrgestells	126 mm
Min. Hubhöhe	898mm
Max. Hubhöhe	1.726 mm
Gesamthöhe	1.168 mm
Akku	24 V

Zubehör / Optionen

Komfort-Aufrichtgurte (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XL)
Doppelkniepolster
Ersatzakku 24 V
Wandladegerät



Heim- und Spitalbedarf | CH-5612 Villmergen
Telefon +41 56 618 32 32 | BinderRehab.ch