



inspire joy of life

NETTI
PRODUKTE

Ausg. 2022/01

NETTI III

Basis für einzigartige Individualisierung

Die Netti III Familie besitzt die meisten Konfigurationsmöglichkeiten aller Nettis mit einem großen Zubehörprogramm mit unzähligen Lösungen



350-500 mm

Sitzbreite




400-500 mm

Sitztiefe



500 mm
(600 mm)

Rückenhöhe

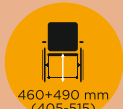


460+490 mm
(405-515)

Sitzhöhe



-9° - +16°

Sitzwinkel

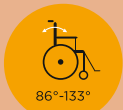

86°-133°

Rückenwinkel



145 kg

Belastbarkeit



29,7-32,8 kg

Gewicht



Max. 136 kg

Crashtest



18.50.02.7038
50.45.07.2009

HMV & PHMV



DYNAMIC


Dynamischer Rücken und dynamische Beinstützen

Mit den dynamischen Komponenten wird der Netti III der ideale Rollstuhl für unruhige Nutzer. Rücken, Kopfstütze und Fußstützen können dynamisch sein. Der Stuhl absorbiert somit die Ausdehnungsbewegungen. Der Netti III HD ist zusätzlich mit dynamischer Sitzplatte verfügbar.



Benutzeranpassung

Der Netti III bietet das meiste Zubehör auf dem Markt. Dank seiner flexiblen Konstruktion kann er so konfiguriert werden, dass er sich an die besonderen Bedürfnisse des Benutzers anpasst.

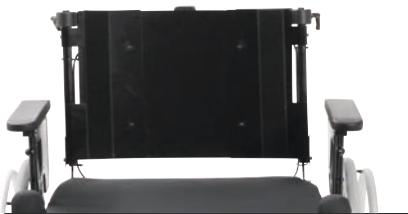

Feste Rückeneinheit Aluminium

Für Benutzer, die eine festere Rückenstütze benötigen, ist ein Aluminium Rücken in Rückenhöhe 500 mm oder 600 mm verfügbar.



Einhandbremse

Für Benutzer, die nur einseitig die Bremse benutzen können, bieten wir eine Trommelbremse mit Bremszug an, die über die Benutzerbremse bedient wird. Auf Anfrage bieten wir eine mechanische Zentralbremse an.



Gleitsitz oder Komfortplatte

Der Gleitsitz kann als Hilfsmittel für einen einfachen Transfer und die Positionierung des Benutzers empfohlen werden. Die Sitzplatte lässt sich herausziehen und einschieben, während der Benutzer im Stuhl sitzt. Dies gewährleistet, dass der Benutzer im Stuhl ganz hinten sitzt. Die Komfort-Sitzplatte unterstützt die druckentlastende Wirkung des Sitzkissens und lässt das Becken tiefer einsinken. Dadurch wird die Sitzposition stabilisiert und einer Tendenz zum nach vorne rutschen vorgebeugt.



Gepolsterter Fußkasten

Empfohlen für unruhige Benutzer. Schaumgepolstert mit Überzug aus kräftigem Skai, das leicht zu reinigen ist. Durch Verwendung von Schließbrackets lässt sich der Fußkasten leichter anbringen bzw. abnehmen.

 **Netti** Customized
COMFORT



Sonderbau für Individualisierung

Aufgrund seiner flexiblen Konstruktion ermöglicht der Netti III individuelle Sonderanpassungen. Der Netti III dient oft als Basis für die Sonderanpassung für Benutzer mit speziellen Anforderungen.

Variable Sitzhöhen

Durch eine große Auswahl an Antriebs- und Lenkrädern kann die Sitzhöhe dem Nutzer angepasst werden. Eine Sitzhöhe von 405 mm bis 515 mm ist möglich.



 **Meyra GmbH**
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf

 **Netti Spezialisten**
info@my-netti.com
Tel.: 0800 888 45 60
Fax: 0800 888 45 68

www.my-netti.de

MEYRA 2022-04 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261505800

Bildnachweis: Seiten 4 © „Vasyl“ – stock.adobe.com; Seite 26 © „bphoto“ – stock.adobe.com;
Seiten 100, 101 Icon user group © „martialred“ – stock.adobe.com