

SYST'AM® P361C / VISCOFLEX®-KISSEN

ANATOMISCH SPRITZGEFORMTES KISSEN AUS VISKOELASTISCHEM SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS

MATERIALIEN

80
kg/m³



Visko
Schaumstoff



Abnehmbarer
atmungsaktiver
Jersey-Bezug.



Abnehmbarer
flüssigkeits-
abweisender
Polymaille-
Bezug.



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Reinigung des Schaumstoffes:



(Nicht unter Wasser tauchen)

Reinigung Bezug:



INDIKATIONEN

Risiko



Risikobewertung nach Braden
Skala mit den weiteren
Risikofaktoren oder mit
anderen validierten Skalen
(Norton - Waterlow, ...)


Die P361C / VISCOFLEX®-Kissen kann
zum Einsatz kommen, wenn :

- 1. bereits Dekubitalulzera (Stadium I bis II nach EPUAP) vorliegen. Der Patient kann die Sitzposition verändern oder die Druckpunkte werden durch Pflegekräfte entlastet. oder
- 2. Ein erhöhtes bis sehr hohes Risiko nach Braden Skala vorliegt. Das P361C-Kissen ist geeignet für Patienten :
 - mit Dekubitusvorgeschichte am Steiß- und Kreuzbein, und/oder
 - mit vollständiger oder unvollständiger Lähmung einer Körperhälfte, und/oder
 - mit Störungen des Wahrnehmungsvermögens der unteren Gliedmaßen, und/oder
 - mit Störungen der frontalen Stabilität, und/oder
 - mit leichter Asymmetrie und/oder mit vaskulärer Amputation, und/oder
 - mit schlechtem Allgemeinzustand

HMV

Ein Teil der hier angegebenen
Produkte ist im HMV unter Nr.
11.39.01.1005 gelistet:
<https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de>

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

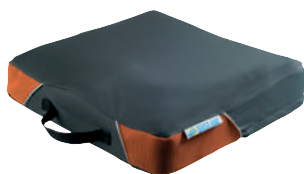

P361C / VISCOFLEX®-Kissen
Mit Bezug.



P361C-S / VISCOFLEX® Soft-Kissen
Für Patienten < 70 kg.
Mit Bezug.

BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR		
P361C / VISCOFLEX®-Kissen	P361C3636IHS	36 x 36 cm	30 - 50 kg
	P361C3838IHS	38 x 38 cm	30 - 90 kg
	P361C4040IHS	40 x 40 cm	40 - 100 kg
	P361C4242IHS	42 x 42 cm	40 - 100 kg
	P361C4246IHS	42 x 46 cm	40 - 110 kg
	P361C4542IHS	45 x 42 cm	40 - 110 kg
	P361C4546IHS	45 x 46 cm	40 - 130 kg
	P361C4843IHS	48 x 43 cm	40 - 140 kg
	P361C5146IHS	51 x 46 cm	60 - 150 kg
	P361C5150IHS	51 x 50 cm	60 - 160 kg
P361C-S / VISCOFLEX® Soft-Kissen	P361CS4242IHS	42 x 42 cm	30 - 70 kg

→ Alle Kissen Größen sind auch mit einem Polymaille® flüssigkeitsabweisendem Bezug lieferbar.
Dafür ersetzen Sie «IHS» (Jersey-Bezug) durch «IHW» (Polymaille®-Bezug).



Gewährleistung







VISKOELASTISCHER SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS

- Die Formgedächtniswirkung ermöglicht ein präzises, sanftes Ausformen der Kreuzbein-Gesäßregion, was zu einer erheblichen Verminderung des Drucks auf die Haut sowie zu einer Vergrößerung der Kontaktfläche des Körpers mit dem Kissen führt. Dies garantiert eine effiziente Vorbeugung und eine leichtere Durchblutung.
- Die Formgedächtniswirkung ermöglicht auch eine höhere Stabilität des Patienten auf dem Kissen, wodurch die Erhitzung, Reibung und Scherkräfte vermindert werden.
- Mit seinem sehr hohen Raumgewicht verhindert dieses Material jegliches Durchdrücken und Verformung.

OBERFLÄCHE MIT LÜFTUNGSKANÄLEN

- Bessere Belüftung zur Verminderung der Feuchtigkeit.
- Das Material folgt dem Körper besser bei Bewegungen, deshalb weniger Reibung auf der Oberfläche.

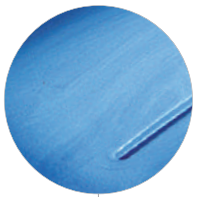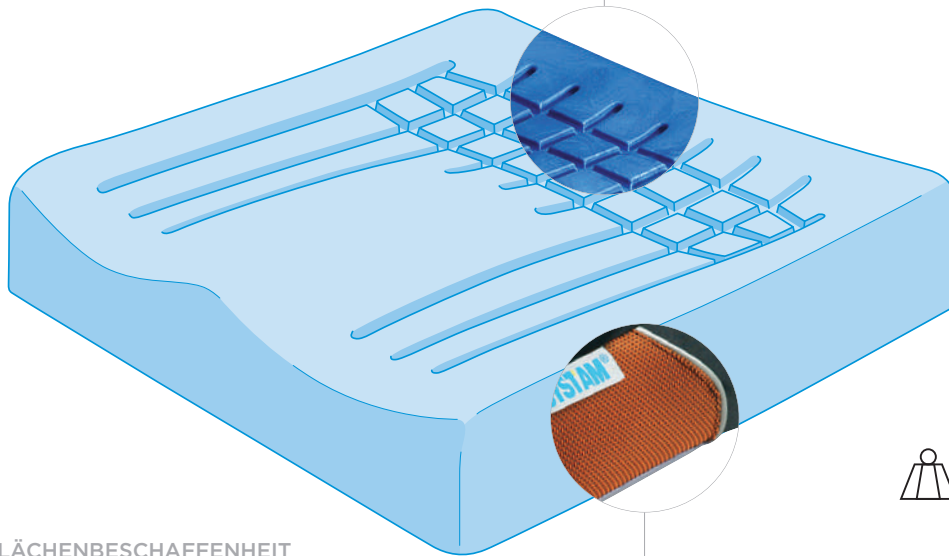

HAUTARTIGE OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT DURCH SPRITZFORMEN


- Sperre gegen Mikroorganismen. Barriere, die das Produkt schützt und ihm eine ausgezeichnete Haltbarkeit verleiht.



KISSENMASSE UND ANWENDUNGSRICHTUNG IM SCHAUM EINGEPÄGT

ANATOMISCHE FORM : MIT ERHÖHTEN SEITLICHEN RÄNDERN UND ABGESENKTER SITZFLÄCHE IM STEISSBEINBEREICH


- Verbessert die Sitz-Position, die Stabilität und den Komfort.
- Vergrößert die Kontaktfläche, wodurch die Druckbelastungen vermindert werden.

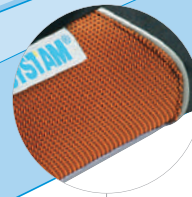

EXTRA-LEICHT

2 BEZUGSAUSFÜHRUNGEN

- Atmungsaktiver und dehnbarer Jersey-Bezug;
- oder
- Flüssigkeitsabweisender und luftdurchlässiger Polymaille®-Bezug.

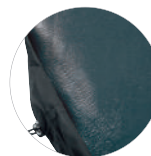


RUTSCHFESTE UNTERSEITE

- Verleiht eine bessere Haftung des Kissens auf dem Stuhl.



- Hinweise über die Produktmaße und die Anwendungsrichtung auf der Außenseite des Bezuges

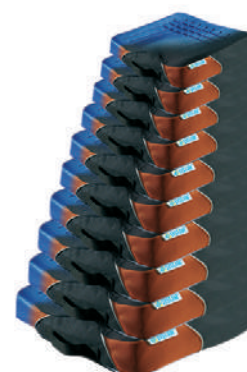

LIEFERBAR IN VIELZÄHLIGEN GRÖSSEN